



Prestan Professional Training Manikin

프레스탄 "전문가용" 실습 마네킹



사용설명서

Prestan Professional CPR <U.S.A>
실습용 심폐소생 마네킹 (my-PPM100)



<www.mymedical.co.kr>



<U.S.A>

Professional Training Manikin

<교육에서 평가까지 가능한 심폐소생 마네킹>

제품명	myPPM-100
구성물	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 마네킹 몸통, 머리 - 각 1개 ❖ 페이스 쉘드 링백 - 10 개 ❖ 페이스 쉘드 - 1롤 (50개) ❖ 운반케이스 겸용 실습매트-1개
제원	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 크기 - 63X34X 27cm ◆ 무게 - 2.2kg

- 특 징 -

1. 실물 같은 인조피부 사용으로 세척용이.
2. 정확한 흉부 압박시 “딸깍” 소리 기능.
3. 기도 확보시 인공 호흡 가능.
4. 인공 호흡시 가슴이 부풀어 오름 관찰 가능 .

□ 세척 방법 □

1. 피부가 더러운 경우,
비누와 물의 혼합액으로 세척
2. 매우 더러워진 경우,
Formula409/Windex/Vim과 같은 일반
가정용 클리너를 사용.
3. 클리너의 사용은 피부의 수명유지를 위해
최소한의 마찰로 주의 깊게 사용.

문제해결

1. 교환 폐를 붙였을 때 가슴이 부풀지 않는다면,
 - 머리가 뒤로 기울어져 있는지 점검.
 - 링백(폐) 자체 또는 페이스 쉘드 점검.
 - 백이 찢어지지 않았는지 확인.
2. “딸깍” 소리가 들리지 않는다면,
 - 압박을 4.5cm 의 압력으로 눌렀는지 확인.



세부적 기능 (my-PPM100)

1. 기도 확보 기능

- 정확한 기도 확보시 인공호흡 가능.



2. 흉부 압박 기능

- 정확한 위치, 적당한 깊이 (4.5cm)로 압박시 “딸깍” 소리 남.



페이스 쉘드
- 1롤 (50개)

3. 몸통 개방 기능

- CPR 어깨에 위치한 탭을 당기면 쉽게 몸통이 개방되므로, 페이스셸드링백 교환이 용이하고, 내부 청소 및 관리가 용이하다.



4. 위치 표시 기능

- 정확한 압박위치 시술.



페이스 쉴드 링백 교환법

<my-PPM100>

1. CPR 어깨에 위치한 탭을 당겨 몸통을 개방한다.
2. 링백(교환 폐)에 인쇄된 점선을 따라 네겹으로 접는다.
3. 마네킹 머리의 턱을 든다.
4. 링백(교환폐)의 접혀진 끝을 마네킹 입 안으로 삽입한다.
5. 링백이 목을 통과하여 나오면, 링백을 잡아당겨 잘 펴서 원형 가슴 압박 판에 위치시킨다.
6. 입 부분의 페이스 쉴드 양 끝을 마네킹 귀 아랫부분의 돌출 버튼에 걸어 끼워 놓는다.
7. 어깨 탭에 똑 소리가 날 때까지 눌러서 몸통을 닫는다.

